

Návod k naplnění dávkovače Green&Clean M2

- 1) Otevřete balení a vyndejte sáček s náhradní náplní.

Každá sada obsahuje stejné množství sáčků Green&Clean M2 red (červený) a Green&Clean M2 green (zelený).

Vždy střídáte barvy tj.: když dopotřebujete Green&Clean M2 red(červený) vyměňte jej za Green&Clean M2 green (zelený) a naopak.

- 2) Odšroubujte (proti směru hodinových ručiček) prázdnou nádobku z horní části dávkovače.
- 3) Roztrhněte (kde je vyznačeno) sáček s náhradní náplní a nalijte jeho obsah do dávkovače.
- 4) Znovu připojte nádobku k dávkovači a pevně zašroubujte (po směru hodinových ručiček).

Každodenní použití

Je doporučeno, aby zubní souprava byla čištěna a desinfikována dvakrát denně, v poledne a večer.

Po chirurgickém zákroku by měla být provedena desinfekce neprodleně.

5) Dávkování

Dvakrát zmáčkněte pumpičku dávkovače. Tímto je přesně odměřeno 6 ml M2 do míchací nádoby.

Pozor! Moc silné dávkování může způsobit škodu na zařízení.

6) Míchání

Zvedněte míchací nádobku z dávkovače. Naplňte nádobku až k rysce vodou (600ml). Tento vytvořený roztok má 1% koncentraci.

7) Dezinfekce

Držte malou sací trubičku na otvoru označeném "1" dokud neuslyšíte že vzduch byl nasán dovnitř. Takto jste automaticky a rychle nasáli přesně správné množství roztoku.

Zopakujte postup s větší sací trubičkou a otvorem označeném "2"









8) Čištění a desinfekce plivátka

Jednoduše nalijte zbytek roztoku (200 ml) z míchací nádoby do plivátka a opláchněte rychle vodou.

Abyste se vyhnuli jakýmkoliv chemickým reakcím nepoužívejte žádné jiné čisticí prostředky k čištění plivátka či sacího systému.

Dávejte pozor na to, aby Green&Clean M2 byl vždy používán až po opláchnutí míst určených k čištění studenou vodou.

Pro dentální soupravu bez plivátka nebo se 3 sacími trubičkami prosím objednejte alternativní soupravu. (ref. No.:40 20 0002).

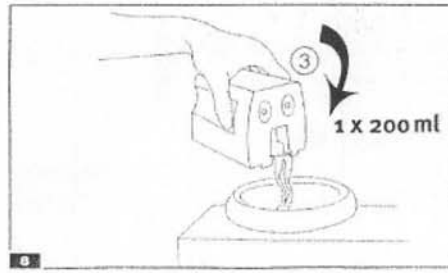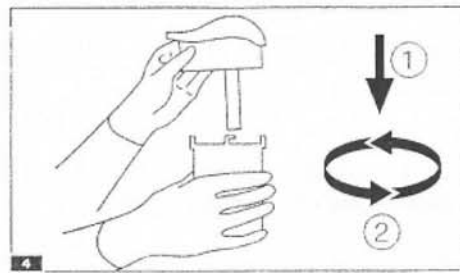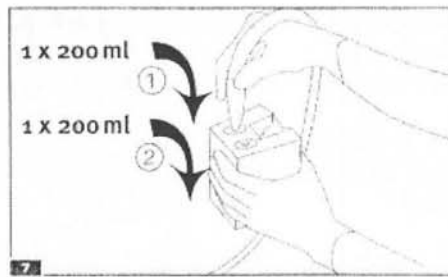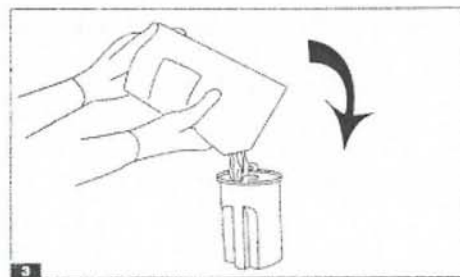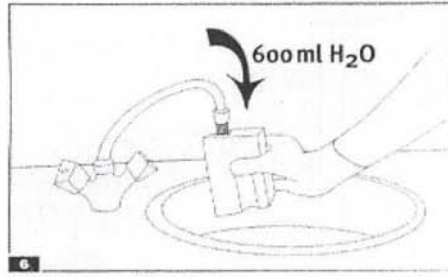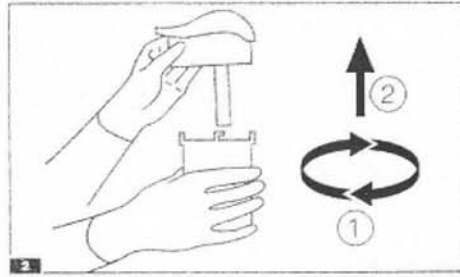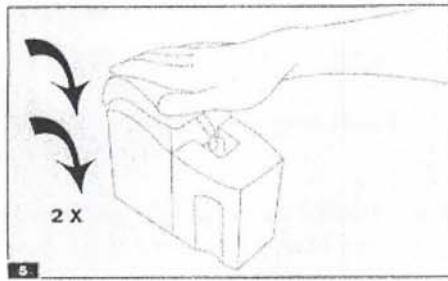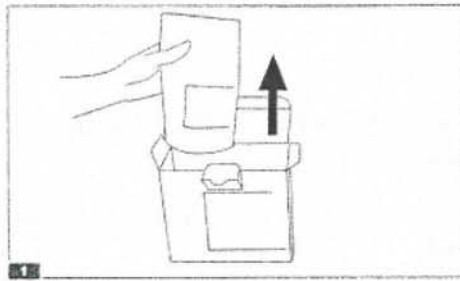

METASYS